


B. シアン（シアン-テストワコー）¹⁾

i) 操作法

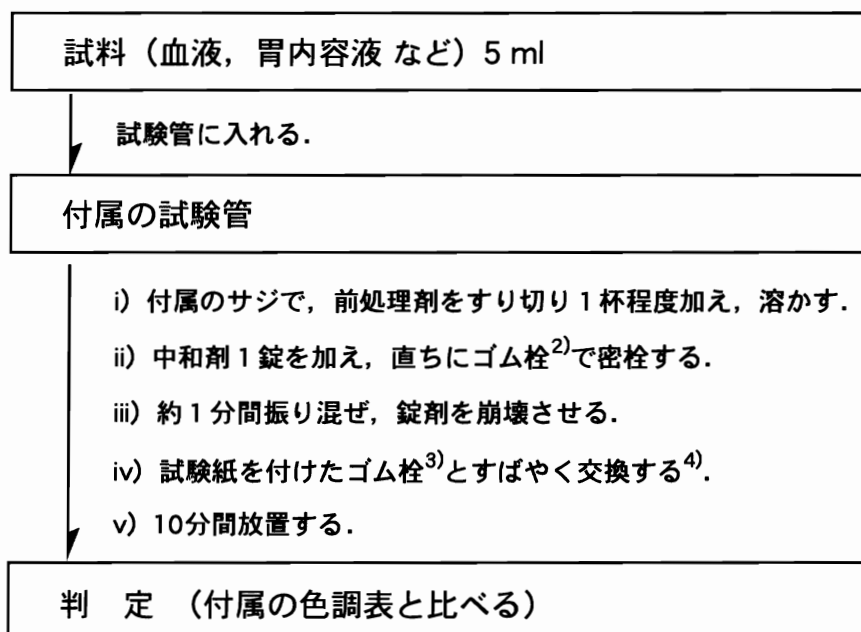

【注 解】

- 1) 和光純薬工業（株）から発売されている 50 回用のキットであり，ここで使用する器具，試薬等は全てキットに含まれる。
- 2) このゴム栓は切れ目のないものを使用する。
- 3) 切れ目のあるゴム栓に試験紙をはさみ，発色試液 1 滴で湿らし，余分な発色試液は振り落とす。
- 4) 試験紙が試験管の内壁に接触しないように注意する。もし接触した場合は取り替える。